



# Alensa

## ◦ Pomůcka na měření PD (vzdálenosti zornic)

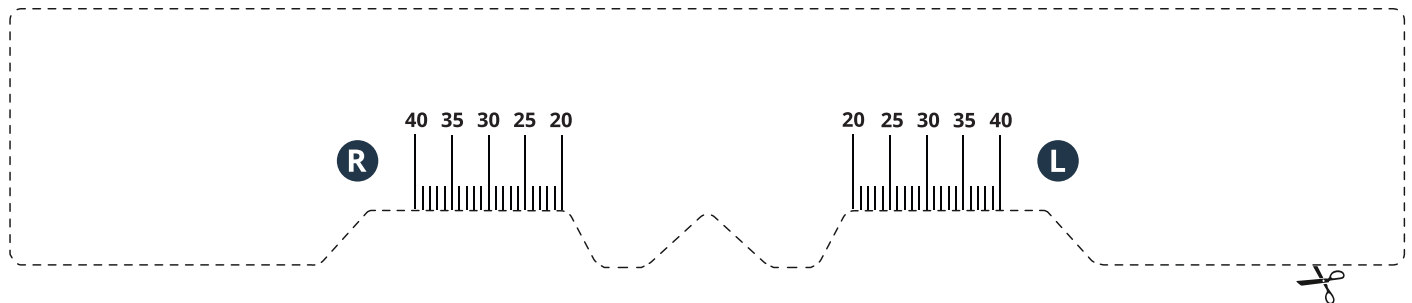

## ◦ Jak si změřit PD - pupilární distanci?

1. Vytiskněte si tuto stránku ve skutečné velikosti (v nastavení tisku vyberte měřítko: výchozí).
2. Ověřte si, že jste správně nastavili tisk. Centimetry na pravítku níže musí odpovídat skutečnosti (1 cm musí být 1 cm).

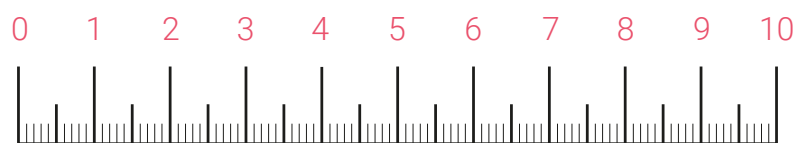

3. Pomůcku na měření si vystříhnete.
4. Měření PD proveďte následovně: Pomůcku na měření přiložte na kořen nosu stejně, jako byste si nasazovali brýle. Pokud budete měření provádět sám/a, postavte se přibližně půl metru před zrcadlo. Zadívejte se před sebe, zavřete levé oko a na pravítku si fixem označte, kde se nachází vaše pravá zornička (R). Totéž opakujte s druhým okem. Měření jde snadněji, když vám někdo pomůže. Vy si přidržíte pomůcku na měření a druhá osoba označí vzdálenost zorniček pro pravé oko (R) a levé oko (L).
5. Naměřené hodnoty pro PD zadejte do objednávkového formuláře [www.alensa.cz](http://www.alensa.cz)

